

# Regard®

Innovative  
contact lens solution

NL

Gefeliciteerd met uw keuze voor REGARD®, een wetenschappelijke innovatie voor het onderhoud van contactlenzen waardoor ze comfortabel zitten en hygiënisch zijn. REGARD bevat een actief desinfecterend middel (gestabiliseerde complexe molecuul OxyChlorite®) dat in de natuurlijke bestanddelen van tranen wordt omgezet (H<sub>2</sub>O en NaCl) en zuurstof afgeeft. Dit middel draagt zorg voor de gezondheid van uw ogen dankzij de afwezigheid van conserveermiddelen, zoals PHMB.

REGARD reinigt, spoelt, desinfecteert, bewaart en smeert zachte contactlenzen. Bovendien verwijdert de alles-in-één oplossing van REGARD de eiwitaanslag die zich op het oppervlak van de contactlenzen vormt.

REGARD is een steriele, Isotone en gebufferde oplossing met gezuiverd water, natriumchloride, boorzuur, hydroxypropylmethylcellulose (0,15%), poloxamine en OxyChlorite®.

## Gebruiksaanwijzing

- Was uw handen altijd zorgvuldig voordat u de lenzen verwijdert.
- Giet enkele druppels REGARD op de contactlenzen en wrijf zachtjes om het oppervlak te reinigen.
- Spoel de lenzen met REGARD om het vuil te verwijderen. Gebruik nooit kraanwater!
- Gebruik alleen de originele REGARD lens houder. Draai de dop van de houder (met hartje is voor de linker lens, zonder hartje is voor de rechter lens) en vul de houder met de REGARD vloeistof.
- Zorg dat de buitenzijde van de lens naar de bodem gericht is is wanneer deze in de houder geplaatst wordt. Plaats de lens centraal van de houder zodat deze niet beschadigd wordt wanneer de dop erop wordt gedraaid.
- Sluit de lenshouder zorgvuldig en draai hem even onderste boven ter controle.
- Laat de lenzen minstens sechs zes uur in de lenshouder om ze te desinfecteren en de eiwitaanslag te verwijderen. REGARD vernietigt de schadelijke micro-organismen en hun toxines en enzymen. Als de lenzen langer dan dertig dagen worden bewaard, dient u ze opnieuw te desinfecteren voordat u ze gaat dragen.
- REGARD kan gebruikt worden voor het bevochtigen en smeren van de lenzen voordat u ze inzet.
- Spoel de lenshouder met de REGARD oplossing en laat hem drogen.

## Voorzorgsmaatregelen

Fles: Niet gebruiken als de fles is beschadigd of het zegel is geknoeid.

Verpakkingen voor éénmalig gebruik (monodose): Gebruik alleen onbeschadigde verpakkingen.

REGARD kan niet opnieuw worden gebruikt.

Fles: Zorg ervoor dat de punt van de fles nooit met enig oppervlak in aanraking komt en sluit de fles na elk gebruik goed af.

Verpakkingen voor éénmalig gebruik (monodose): Vermijd de doseertip aan te raken.

Houd de flacon uit de buurt van warmtebronnen en zonnestralen.

Gebruik het product niet na de vervaldatum.

Fles: 90 dagen houdbaar na openen van de fles.

Verpakkingen voor éénmalig gebruik (monodose): Elke verpakking is voor éénmalig gebruik en kan na opening niet hergebruikt worden omdat verontreiniging op kan treden.

Gebruik altijd de nieuwe bijgeleverde houder.

Als het niet mogelijk is om de lens houder te reinigen of wanneer er blijvende aanslag in de lens houder ontstaat, moet deze worden vervangen.

Zoals bij alle persoonlijke verzorgingsproducten moet het gebruik bij irritatie of allergie voor één van de componenten onderbroken worden en moet een specialist geraadpleegd worden. Buiten bereik van kinderen houden. Niet inslikken.